



PROCEDURA PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI (TAMPONE DELLA CLOCA)

Prima di procedere il prelievo assicurarsi di avere le mani pulite. Se dovete prelevare campioni da diversi uccelli, lavare le mani tra un prelievo ed il successivo.

Seguire la procedura di seguito descritta:

1. Riempire la domanda per l'esecuzione del test inserendo tutti i dati (proprietario, nome del volatile, anello n° o gabbia n° o banda n° ...).
2. Riportare i dati identificativi del volatile sull'etichetta predisposta sulla provetta in plastica o del tampone che raccoglierà il campione (in modo da poter poi collegare il risultato con il volatile giusto).
3. Al momento del prelievo del tampone occorre **MANTENERE AL MINIMO LA CONTAMINAZIONE DA FECEI. ESTRARRE IL TAMPONE DALLA PROVETTA ED INSERIRLO NELLA CLOACA (ANO) RUOTANDO SU SE STESSO IN MODO DA PRELEVARE LE CELLULE DELLA MUCOSA INTESTINALE.**
4. Richiudere il tampone nella rispettiva provetta, evitando di toccare il cotone con le mani.
5. Scrivere i dati del volatile sull'apposita etichetta.
6. Porre la/e provetta/e con i campioni nella busta per la spedizione insieme a:
 - modulo di richiesta
 - ricevuta di pagamento (bollettino postale o bonifico bancario) ed inviarlo all'indirizzo pre-stampato sulla busta:

**Biovet di Salvatore Pagano
Via Saracari Centoni n°9/10
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italia**

Per qualunque informazione o chiarimento:

- Mail: laboratori.biovet@gmail.com
- Tel/fax: 081/5298950