


PROCEDURA PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI (PENNE)

Prima di procedere al prelievo assicurarsi di avere le mani pulite. Se dovete prelevare campioni da diversi uccelli, lavare le mani tra un prelievo ed il successivo. Cercare di evitare di toccare la base della penna.

Seguire la procedura di seguito descritta:

1. Riempire la domanda per l'esecuzione del test inserendo tutti i dati (proprietario, nome del volatile, anello n° o gabbia n° o banda n° ...).
2. Riportare i dati identificativi del volatile sull'etichetta predisposta sulla busta in plastica che raccoglierà il campione (in modo da poter poi collegare il risultato del test del DNA con il valore giusto).
3. Prelevare 3 PENNE dalla coda o dall'ala o dal petto del volatile da testare. NON sono richieste penne primarie o sangue alle loro estremità: è sufficiente che la lunghezza della penna prelevata sia 5-10 cm. Se si tratta di piccoli volatili (sia come età sia come dimensioni) sarà necessario prelevare 4-5 PENNE da qualsiasi parte del piumaggio dell'animale.

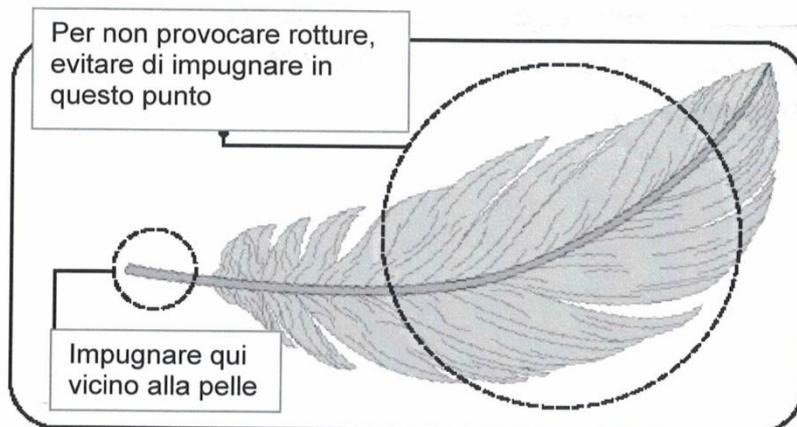

4. È fondamentale NON raccogliere penne già cadute dal terreno ma prelevarle dal volatile ed inserirle subito nell'apposito sacchetto cercando di maneggiarle meno possibile e soprattutto di non toccare la base della penna.
5. Strappare la striscia in plastica trasparente nella parte superiore del sacchetto. Impugnare i due lembi centrali in carta bianca e tirare verso l'esterno per aprire il sacchetto.



6. Porre le penne nel sacchetto in plastica e richiuderlo in modo da sigillare il sacchetto.
7. Scrivere i dati del volatile sull'etichetta apposita. Ogni sacchetto deve contenere i campioni di UN SOLO uccello.
8. Porre il/i sacchetto/i con i campioni nella busta per la spedizione insieme a:
 - modulo di richiesta
 - ricevuta di pagamento (bollettino postale o bonifico bancario) ed inviarlo all'indirizzo già stampato sulla busta:

Biovet di Salvatore Pagano
Via Saracari Centoni n°9/10
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italia

Per qualunque informazione o chiarimento:

- Mail: laboratori.biovet@gmail.com
- Tel/fax: 081/5298950